



# Zytologische Untersuchungen: Fixierung und Transport Konventionelle gynäkologische Abstriche

- **Bitte Objektträger immer mit Vor- und Zunamen und Geburtsdatum der Patientin beschriften!**
- **Fixierung:**
  - Abstrich direkt nach der Entnahme für mind. 20 min in eine Küvette mit 98%-igen Alkohol stellen.
    - Alkohollösung täglich erneuern.

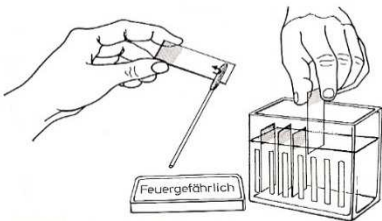

- oder mit Spray

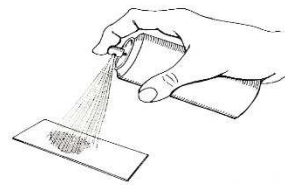

- **Transport:**
- Für Objektträger entweder die dazu gestellten Plastikcontainer oder die Versandmappen benutzen.

